



SENNHEISER



Flex 5000

Digital wireless audio system for headphones

Bruksanvisning

Innehåll

Viktiga säkerhetsanvisningar	3
Leveransomfattning	6
Produktöversikt	7
Kom igång med Flex 5000	10
Installera sändaren	10
Anslut sändaren till ljudkällor	11
Anslut sändaren till elnätet	15
Ladda batteriet i mottagaren	16
Visa batteritiden som är kvar	17
Laddningspåminnelse	17
Använd Flex 5000	18
Anslut hörlurar eller induktionsslinga till mottagaren	18
Sätt på det trådlösa hörlurssystemet	19
Stäng av det trådlösa hörlurssystemet	20
Fäst sändaren på kläderna	20
Ställ in volymen	21
Ställ in balans	22
Använd hörprofil för att förbättra klangen	23
Sätt på och stäng av talförståelsen	25
Rengöring och skötsel av Flex 5000	26
Byt batteriet i mottagaren	26
Använd extrafunktioner	27
Sammankoppla en eller flera mottagare med sändaren	27
Avancerade inställningar	28
Återställ fabriksinställningar	31
Ladda batteriet med laddaren MCA 800	32
Åtgärder vid fel	33
Om du lämnar sändarens räckvidd	35
Tekniska data	36
Tillverkarintyg	38

Viktiga säkerhetsanvisningar



- ▶ Läs hela bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- ▶ Skicka alltid med säkerhetsanvisningarna när produkten överlätas.
- ▶ Använd inte produkten om den har synliga skador.
- ▶ Använd endast produkten på platser där trådlös 2,4 GHz-överföring är tillåten.

Förebygg hälsorisker och olyckor



- ▶ En högre volym än normalt kan ställas in i de här hörlurarna. Skydda din hörsel mot hög volym. Skydda din hörsel genom att inte ha för hög volym i hörlurarna under en längre tid. Sennheiser-hörlurar har bra ljud även vid låg och medelhög volym och ger en bra talförståelse.
- ▶ Ställ in en låg volym innan du överlämnar produkten till någon annan så att deras hörsel inte skadas.
- ▶ Använd inte produkten när du måste vara särskilt uppmärksam på omgivningen (t.ex. i gatutrafik eller vid hantverksarbeten).
- ▶ Håll ett avstånd på minst 10 cm mellan hörlurar/laddare MCA 800 och pacemaker eller implanterade defibrillatorer. Hörlurarna/laddaren MCA 800 genererar magnetfält som kan påverka personer som använder pacemaker eller implanterade defibrillatorer.
- ▶ Använd inte produkten i närheten av vatten. Utsätt inte produkten för regn eller fukt. Det finns risk för brand eller elstötar.
- ▶ Förvara produkten, förpackningen och tillbehör oåtkomliga för barn och husdjur för att förhindra olyckor och kvävningsrisk.
- ▶ Använd endast nätadapterar från Sennheiser.

Förhindra produktskador och fel

- ▶ Håll produkten torr och utsätt den inte för extremt låga eller höga temperaturer för att förhindra korrosion och att den deformeras. Den normala användningstemperaturen är 5 till 40 °C.
- ▶ Hantera produkten varsamt och förvara den på ett rent och dammfritt ställe.
- ▶ Stäng av produkten efter användningen så att batterierna inte används i onödan.

- ▶ Dra ut nätadaptern ur eluttaget
 - när du vill koppla bort produkten från strömkällan
 - vid åskväder
 - om du inte ska använda produkten under en längre tid
- ▶ Se till att nätadaptern
 - är lätt att komma åt och att den är i bra skick
 - sitter ordentligt i eluttaget
 - endast används inom det tillåtna temperaturområdet
 - inte utsätts för direkt solljus under en längre tid, vilket kan leda till överhettning
- ▶ Färg och möbelpolish kan bli fläckiga av sändarens fötter. Placera därför sändaren på ett halkfritt underlag.
- ▶ Använd inte produkten i närheten av värmekällor.
- ▶ Rengör endast produkten med en torr och mjuk trasa.
- ▶ Använd endast tillbehör och reservdelar som medföljer eller rekommenderas av Sennheiser.

Säkerhetsanvisningar för uppladdningsbara litiumpolymerbatterier



VARNING

Vid missbruk eller felaktig användning kan batterierna läcka. I extrema fall finns det risk för:

- explosion
- brand
- värmeutveckling
- rök- eller gasutveckling

	Produkter med uppladdningsbara batterier ska stängas av efter användningen.
	Ladda aldrig produkter med inbyggda batterier om produkten är skadad.
	Använd endast batterier och laddare som rekommenderas av Sennheiser.
	Ladda batterierna vid en omgivningstemperatur mellan +5 °C och +40 °C.
	Även om produkten inte används under en längre tid ska batterierna laddas regelbundet (ca var tredje månad).
	Värm inte upp batterierna över 70 °C. Undvik direkt solljus och eld inte upp dem.
	Förbrukade batterier ska återlämnas till särskilda insamlingsställen eller till din återförsäljare.

Korrekt användning och ansvar

Det här trådlösa TV-hörlurssystemet har utvecklats för att användas i kombination med TV-apparater, HiFi-system och hemmabiosystem och kan anslutas till analoga och digitala ljudkällor.

Produkten får bara användas för privat bruk av privatpersoner. Den är inte avsedd för professionellt bruk. Produkten är inte avsedd att användas med bärbara ljudenheter.

Det är inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än det som beskrivs i dokumentationen till den.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkten eller tillbehören.

Följ landsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används.

Leveransomfattning




Mottagare RR Flex med inbyggt batteri



Sändare TR 5000 med laddstation



Hörlur MX 475

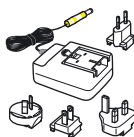


Nätadapter NT 5-10AW med anpassade adaptrar (EU, UK, US, AU)



Optisk digitalkabel, 1,5 m



Stereoljudkabel med 3,5 mm-hankontakter, 1,5 m

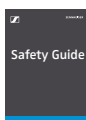

Säkerhetsanvisningar



Snabbguide



Bruksanvisning på engelska, tyska, franska och spanska.


På www.sennheiser.com/download hittar du bruksanvisningar i PDF-format på andra språk.



En lista med tillbehör finns på www.sennheiser.com på produktsidan med Flex 5000. Kontakta din Sennheiser-återförsäljare för mer information om försäljningsställen. Sennheiser-återförsäljare nära dig hittar du på www.sennheiser.com.


Produktöversikt

Översikt över mottagaren RR Flex

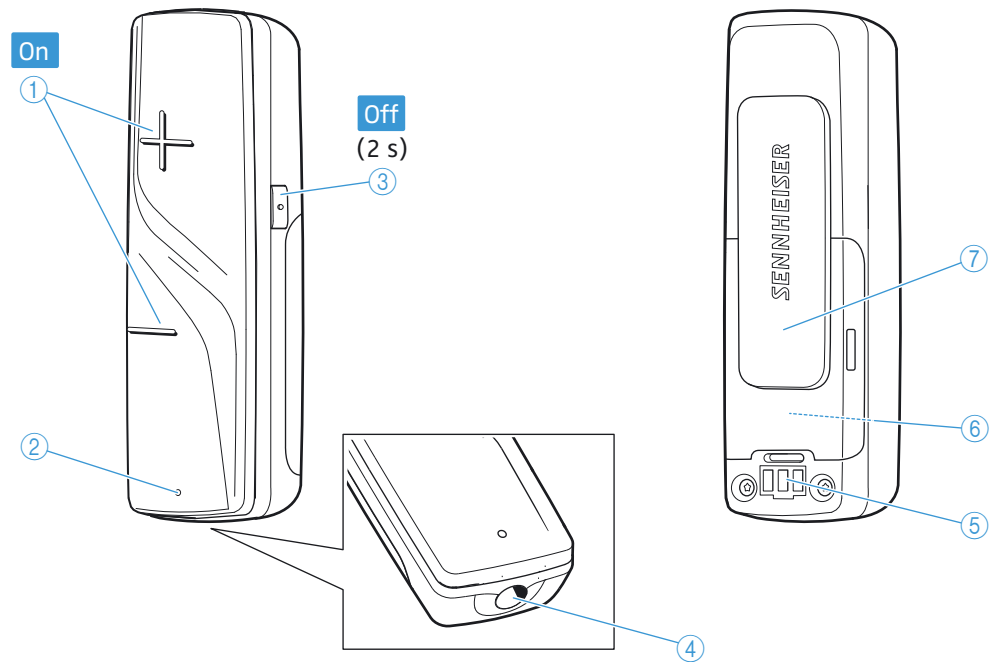


- ① Volymknappar + och – samt mottagarens strömbrytare
- ② Lampa för *mottagarstatus* (se sidan 9)
- ③ Knapp för *talförståelse* och för att stänga av mottagaren (tryck i 2 sekunder)
- ④ 3,5 mm-honkontakt för anslutning av hörlurar eller en induktionsslinga för hörapparater
- ⑤ Laddningskontakter
- ⑥ Inbyggt batteri
- ⑦ Fästklämma


Översikt över sändaren TR 5000

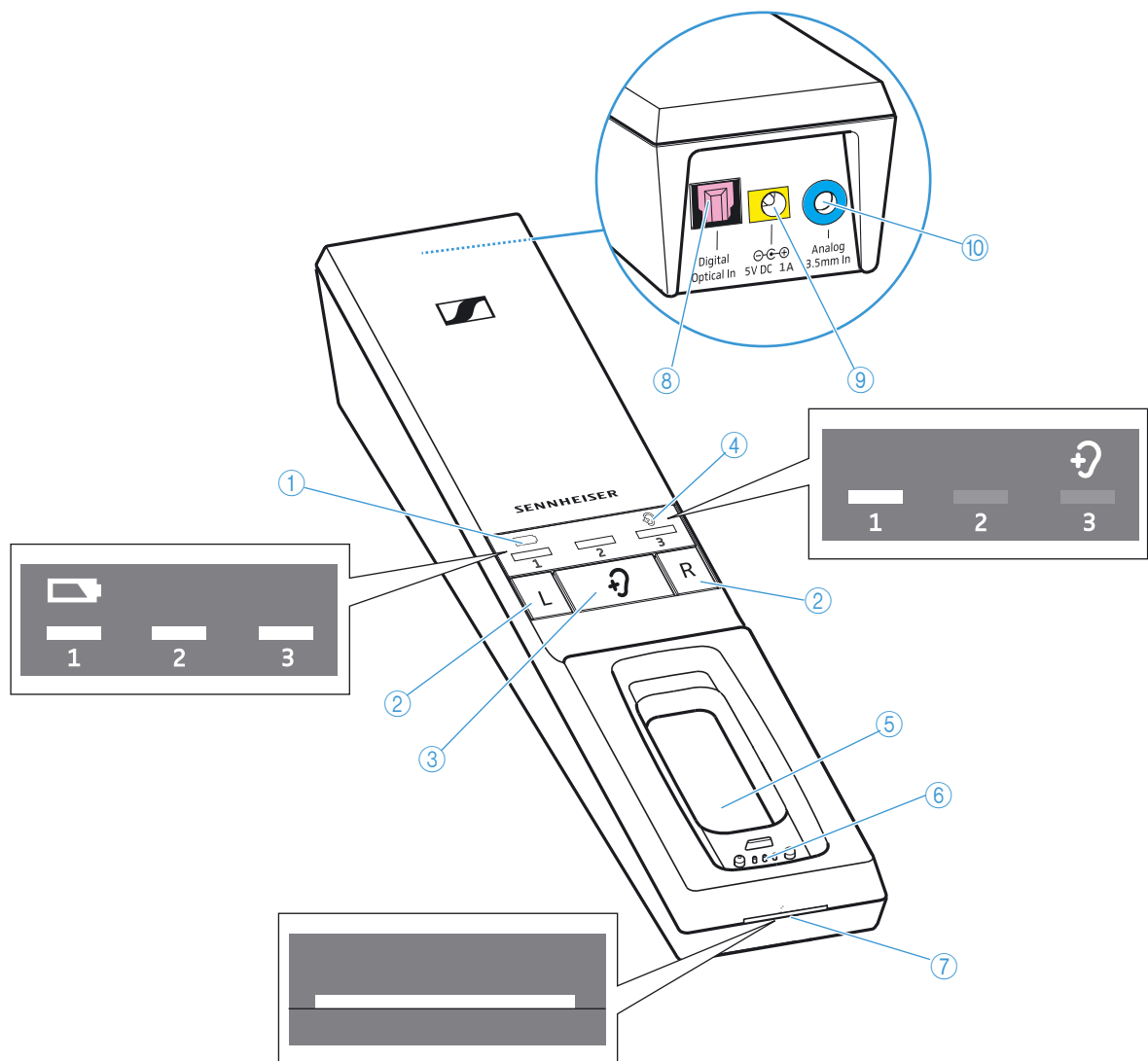


- ① **Batterilampa**  som indikerar laddning/tid kvar för mottagaren (se sidan 16 och 17)
- ② Knappar för balans höger **R** och vänster **L**
- ③ Knapp för *hörprofil*  för att välja hörprofiler (se sidan 23)
- ④ Lampa för *hörprofil*  som indikerar inställd hörprofil (se sidan 23)
- ⑤ Laddningsfack för mottagaren
- ⑥ Laddningskontakter för mottagaren med magneter
- ⑦ Lampa för *sändarstatus* (se sidan 9)
- ⑧ Ljudanslutning **Digital Optical In** för en digital ljudkälla (optisk), rosa
- ⑨ Uttag **5V DC 1A** för nätadaptern, gult
- ⑩ Ljudanslutning **Analog 3.5 mm In** för en analog ljudkälla (3,5 mm-honkontakt), blå


Lampöversikt *mottagarstatus*

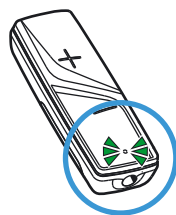

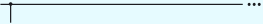Lampa för <i>mottagarstatus</i>	Mottagaren...
—	... är avstängd.
  Lyser grönt	... är ansluten till sändaren.
  Lyser rött	... är ansluten till sändaren, batteriet är nästan slut.
 o o o o  o o o o  Blinkar grönt	... är inte ansluten till sändaren eller kan inte ansluta till sändaren.
 o o o o  o o o o  Blinkar rött	... är inte ansluten till sändaren eller kan inte ansluta till sändaren, batteriet är nästan slut.

Lampöversikt *sändarstatus*

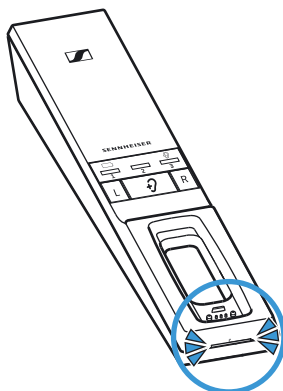

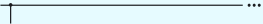Lampa för <i>sändarstatus</i>	Sändaren...
—	... är i standby-läget.
  Lyser vitt	... och mottagaren är anslutna. Talförståelsen är avstängd (se sidan 25).
  Lyser blått	... och mottagaren är anslutna. Talförståelsen är på (se sidan 25).
   Blinkar blått/vitt	... har registrerat en inkompatibel digital ljudsignal (se sidan 12).

i Lamporna på mottagaren och sändaren anger aktuell driftstatus. När knapparna på mottagaren inte används sänks ljusstyrkan automatiskt efter ca 30 sekunder så att du inte störs.

Översikt över ljudsignalerna



Ljudsignaler	Betydelse
Vid användning, 2 pip	Batteriet är nästan slut. Ladda batteriet (se sidan 16).
Vid användning, ingen ljudöverföring, 5 pip	Hörlurarna är utanför sändarens räckvidd (se sidan 35).
När volymen ändras	Max. eller min. volym nådd (se sidan 21).
När balansen ändras	Höger eller vänster ändläge har nåtts (se sidan 22).

Kom igång med Flex 5000

Installera sändaren

- ▶ Installera sändaren i närheten av ljudkällan.
- ▶ Placera sändaren minst 50 cm från andra trådlösa enheter i rummet för att förhindra störningar.
- ▶ Placera inte sändaren för nära metallhyllor, väggar av stålbetong eller andra metallkonstruktioner. Det kan påverka sändarens räckvidd.



Anslut sändaren till ljudkällor

Sändaren kan anslutas till en digital eller en analog ljudkälla (t.ex. en TV eller en stereo).

Om en ljudkälla ansluts till **båda** ingångarna (digital och analog) spelas bara den analoga ljudkällan upp.



Du kan även titta på en film som visar hur hörlurssystemet ansluts till en TV: www.sennheiser.com/how-to-videos.

- ▶ Stäng av ljudkällan innan du ansluter sändaren.
- ▶ Kontrollera vilka anslutningsalternativ din ljudkälla har (ljudutgång, för det mesta märkt "OUT").
- ▶ Välj en anslutningskabel och en passande adapter.
- ▶ Se anslutningsschemat som passar din ljudkälla i kapitlen nedan för att ansluta sändaren till en ljudkälla. Färgmärkningarna på sändaren och på kablarna är till hjälp.

Anslutningsalternativ för ljudkällan			Färgmärkning på sändaren	Anslutningskabel	Sidan
A	Optisk (digital)			Optisk digitalkabel	12
B	3,5 mm-honkontakt (analog)			Stereoljudkabel	13
C	RCA (analog)			Stereoljudkabel med RCA-adapter (3,5 mm-honkontakt till 2 RCA-kontakter; säljs separat)	14
D	SCART (analog)			Stereoljudkabel med SCART-adapter (3,5 mm-honkontakt till SCART-kontakt; säljs separat)	14



Tillbehör och adapterar finns hos din återförsäljare.


A

Anslutningsalternativ A: optiskt (digitalt)

Ljudöverföringen blir bäst när sändaren ansluts med den medföljande optiska digitalkabeln till TV:n eller stereon.


Observera att ditt trådlösa hörlurssystem bara kan återge digitala signaler av standarden **PCM**. Hur den anslutna ljudkällans ljudformat kan ändras till PCM anges i ljudmenyn eller i bruksanvisningen till enheten.

Om en digital ljudsignal som inte är kompatibel används blinkar lampan *sändarstatus* vitt och blått. Det går inte att överföra ljud.

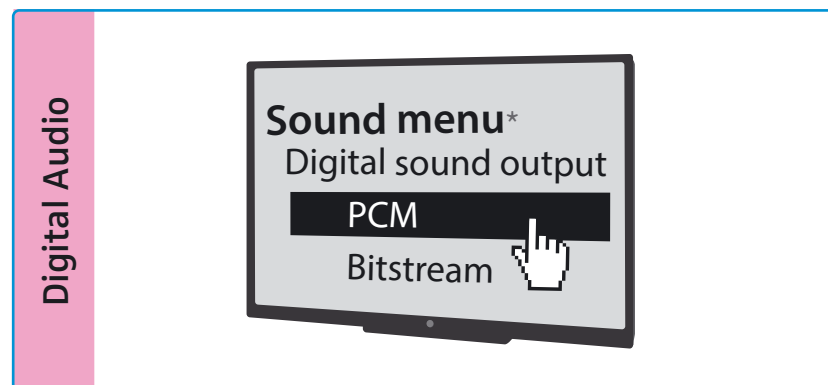


* Ljudmenyn är olika beroende på vilken enhet som används.

- Anslut den optiska digitalkabeln till den rosa ljudanslutningen **Digital Optical In** på sändaren och ljudkällans optiska utgång.

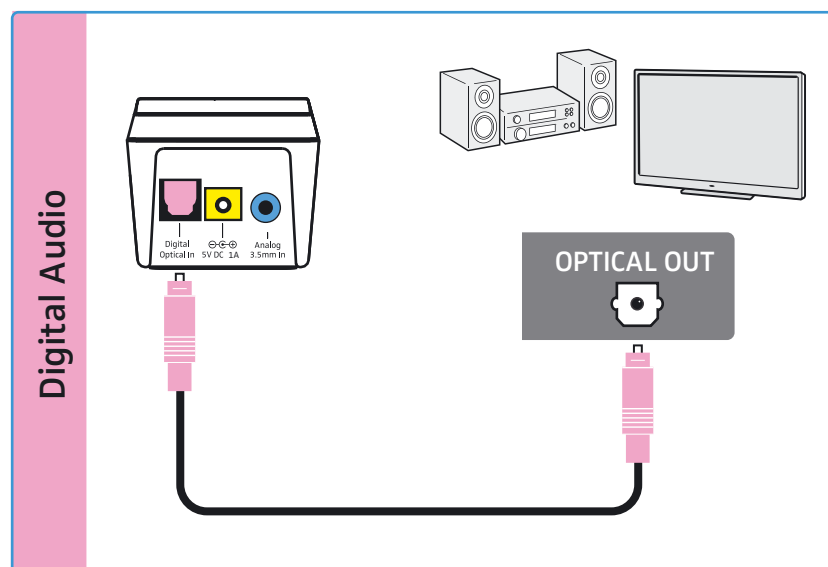

B**Anslutningsalternativ B: 3,5 mm-honkontakt (analog)**

- ▶ Anslut stereoljudkabeln till den blåa 3,5 mm-honkontakten **Analog 3.5 mm In** på sändaren och till 3,5 mm-hörlursuttaget på ljudkällan.

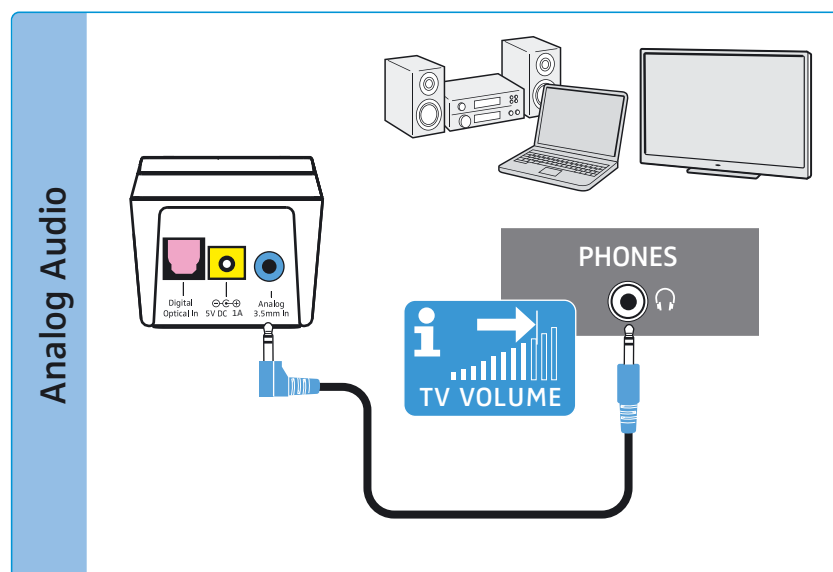

Ställ in volymen på en **lagom nivå** på TV:n/ljudkällan.

Det ger en bättre ljudöverföring. Mer information finns i bruksanvisningen till TV:n/ljudkällan.


Om hörlursuttaget på ljudkällan är ett 6,3 mm-uttag behöver du en adapter för att kunna använda den medföljande 3,5 mm-stereoljudkabeln (3,5 mm-stereohankontakt till 6,3 mm-stereohankontakt, säljs separat).

Vissa TV-apparater stänger av ljudet när sändaren ansluts till 3,5 mm-hörlursuttaget. Andra modeller har en inställningsmeny för hörlursuttagets volym. Kontrollera hur du sätter på ljudet eller ställer in volymen i TV-apparatens menyinställning. Anslut annars till TV:n på ett annat sätt (A, C eller D).

C

Anslutningsalternativ C: RCA-uttag (analogt)

- ▶ Anslut RCA-adaptern* till stereoljudkabeln.
- ▶ Anslut stereoljudkabeln till den blåa 3,5 mm-honkontakten på sändaren.
- ▶ Anslut RCA-kontakterna till ljudkällans RCA-utgångar (för det mesta märkta "AUDIO OUT" eller ). Anslut den röda kontakten till det röda RCA-uttaget och den vita kontakten till det vita eller svarta RCA-uttaget.

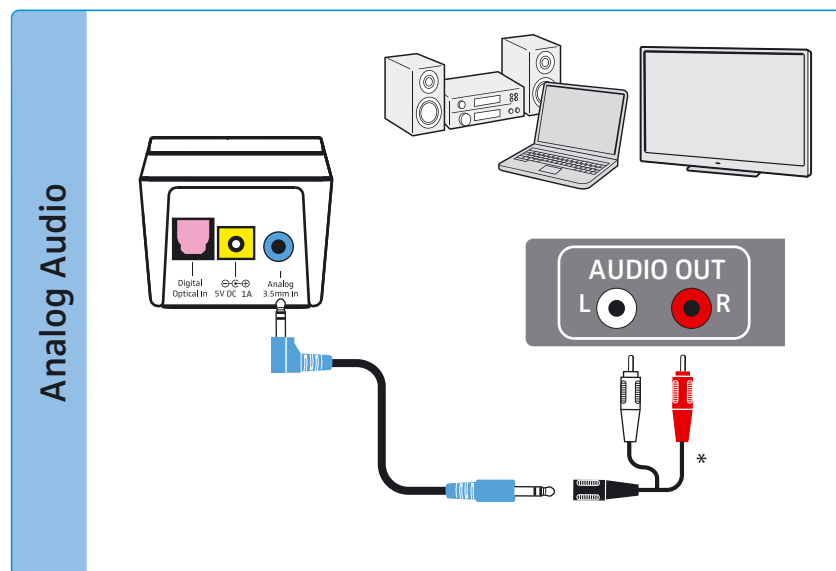


* säljs separat

D

Anslutningsalternativ D: SCART-anlutning (analog)


- ▶ Anslut SCART-adaptern* till stereoljudkabeln.
- ▶ Anslut stereoljudkabeln till den blåa 3,5 mm-honkontakten på sändaren.
- ▶ Anslut SCART-kontakten till ljudkällans RCA-utgång (för det mesta märkt  eller ).

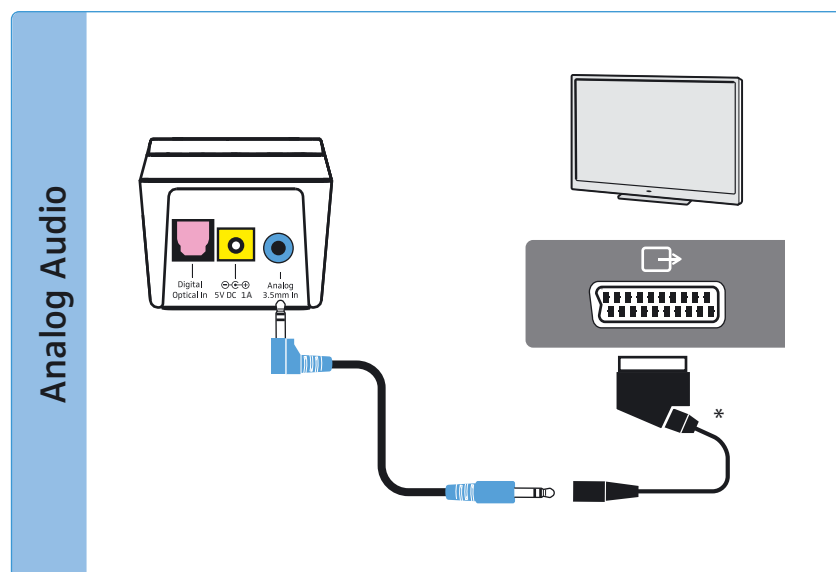

* säljs separat

Anslut sändaren till elnätet

- 1 Anslut kontakten på nätadaptern till det gula uttaget på sändaren.
- 2 Välj en passande adapter och sätt på den på nätadaptern så att det hörs att den hakar fast.
- 3 Sätt in nätadaptern i eluttaget.
Alla lampor på sändaren tänds i 5 sekunder. Sändaren är i standby-läget.

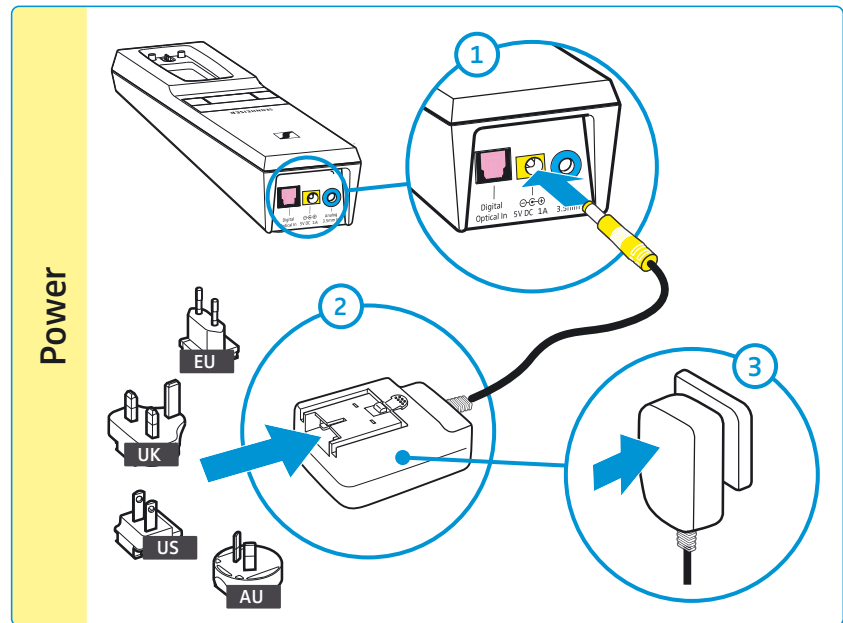


Ladda batteriet i mottagaren



Det tar ca 3 timmar att ladda batteriet helt. Ladda batteriet helt utan avbrott första gången.

När batteriet nästan är slut lyser lampen *mottagarstatus* rött och det hörs 2 ljudsignaler i mottagaren. *Batterilampa* på sändaren blinkar vitt. Mottagaren stängs av inom några minuter.

- Lägg mottagaren i laddningsfacket på sändaren så att volymknapparna är uppåt. Mottagaren hamnar i rätt läge med hjälp av magneterna. Mottagaren stängs av automatiskt och *batterilampa* på sändaren lyser vitt. Lampindikeringarna anger batteriets laddning. När batteriet är helt laddat lyser alla indikeringar vitt.

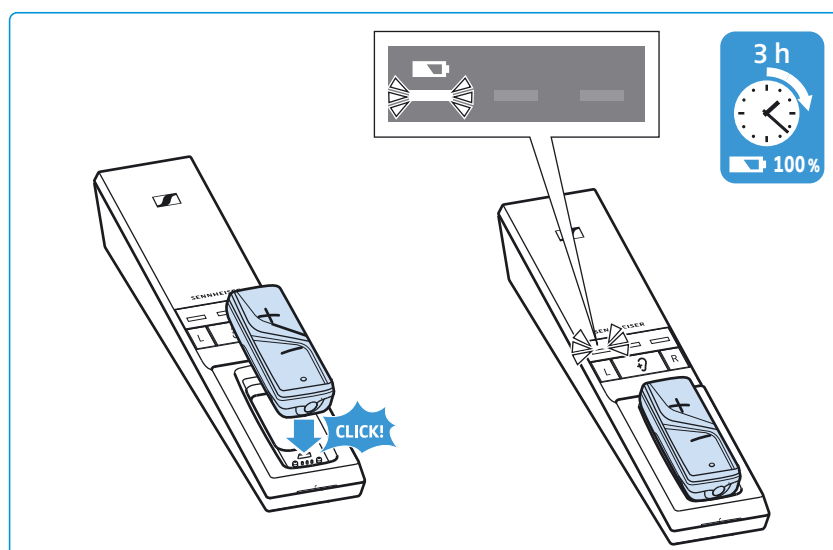

<i>Batterilampa</i>		Betydelse
	–	Sändaren laddar inte.
	Indikering 1 blinkar	Batteriet laddas. Mindre än 1/3 laddad.
	Indikering 1 lyser, indikering 2 blinkar	Batteriet laddas. 1/3 laddad.
	Indikering 1 och 2 lyser, indikering 3 blinkar	Batteriet laddas. 2/3 laddad.
	Alla indikeringar lyser	Batteriet är laddat.
	<i>Batterilampa</i> blinkar snabbt	Ett laddnings-/batterifel har uppstått (se sidan 26).



Bäst laddning uppnår man genom att förvara mottagaren i laddningsfacket på sändaren. Laddningsautomatiken förhindrar att batteriet överladdas och batteriet har alltid full kapacitet.



Du kan ställa in laddningsindikeringen så att den släcks efter 30 sekunder (se sidan 29).

Visa batteritiden som är kvar

När du sätter på mottagaren anger *batterilampan*  tid kvar/laddning.

<i>Batterilampa</i> 		Betydelse
	<i>Batterilampan</i> blinkar långsamt	Batteriet är slut; ladda batteriet
	Indikering 1 lyser	Ca 4 timmar kvar
	Indikering 1 och 2 lyser	Ca 8 timmar kvar
	Alla indikeringar lyser	Ca 12 timmar kvar

Innan en indikering slocknar blir den mörkare för att visa att batteritiden minskar.

Om den verkliga användningstiden avviker mycket från de angivna värden är eventuellt batteriet förbrukat och måste bytas. Information om batterier finns på sidan 26.

 Du kan ställa in batteriindikeringen så att den släcks efter 30 sekunder (se sidan 29).

 Om fler än en mottagare har anslutits till sändaren visas inte batteritid kvar/laddningsstatus.

Laddningspåminnelse



Om mottagaren har stängts av och sändaren stängs av (standby) blinkar *batterilampan*  i 10 minuter för att påminna om att mottagaren ska laddas:

- ▶ Lägg mottagaren i laddningsfacket (se sidan 16).
Laddningspåminnelsen slutar blinka och laddningen börjar.

 Laddningspåminnelsen kan stängas av (se sidan 29).

Använd Flex 5000


Anslut hörlurar eller induktionsslinga till mottagaren

Valfria hörlurar eller en induktionsslinga för hörapparater, som har 3,5 mm-hankontakt, kan anslutas till mottagaren RR Flex.

Anslut hörlurar

Vi rekommenderar att slutna hörlurar eller öron-/öronkanalshörlurar används för att undvika t.ex. heterodynfrekvenser från TV-högtalare.


- ▶ Anslut hörlurarnas 3,5 mm-hankontakt (t.ex. MX 475, medföljer) till uttaget på mottagaren.

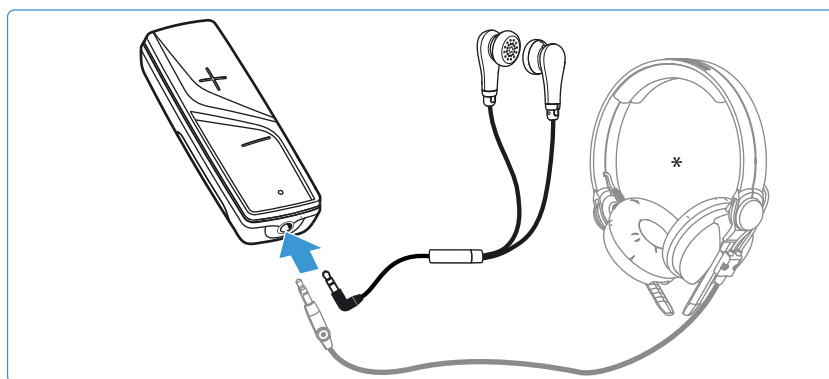

Anslut induktionsslinga för hörapparater

Du kan bara använda induktionsslinga om hörapparaten är ämnad för induktionsspole (T-spole).

- ▶ Anslut induktionsslingans 3,5 mm-hankontakt (t.ex. Sennheiser EZT 3012, säljs separat) till uttaget på mottagaren.

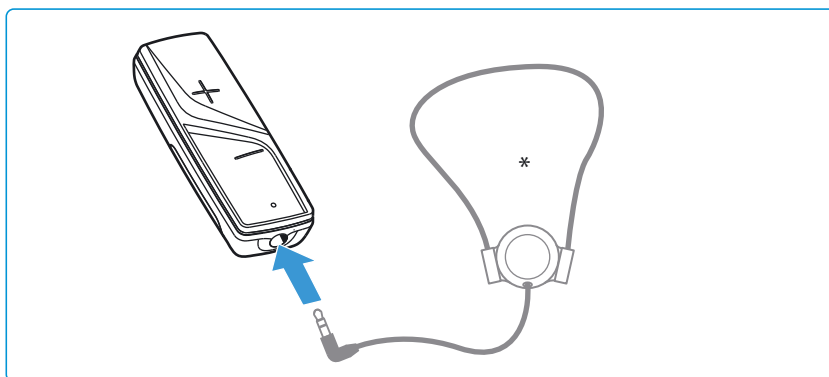


- ▶ Ställ in hörapparaten på T-läget.



Om hörapparaten inte har något T-läge eller om du vill ansluta hörapparaten eller hörselimplantatet på annat sätt måste du kontakta en hörapparatstekniker.

* säljs separat

Sätt på det trådlösa hörlurssystemet

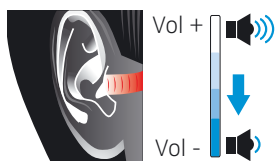

VARNING

Fara på grund av hög volym!

En högre volym än normal kan ställas in i de här hörlurarna. Det kan leda till hörselskador om volymen inte ställs in korrekt.

- ▶ Ställ in en låg volym på mottagaren innan du tar på dig hörlurarna som är anslutna till mottagaren.
- ▶ Utsätt inte din hörsel för hög volym under lång tid.
- ▶ Använd en hörprofil (se sidan 23) som ger en bättre talförståelse utan att volymen måste vara hög.





1 Slå på ljudkällan.



Om sändaren har anslutits till hörlursuttaget (se sidan 13) på TV:n/ljudkällan måste du ställa in volymen i hörlursuttaget på en lagom nivå.

2 Ta ut mottagaren ur laddningsfacket och tryck på knappen + eller -.

Mottagaren aktiveras. Lampan *mottagarstatus* lyser grönt. Sändaren aktiveras automatiskt och lampans *sändarstatus* lyser vitt eller blått. Ljudöverföringen mellan sändaren och mottagaren startar.

Mottagarens tid kvar visas på sändaren (se sidan 17).

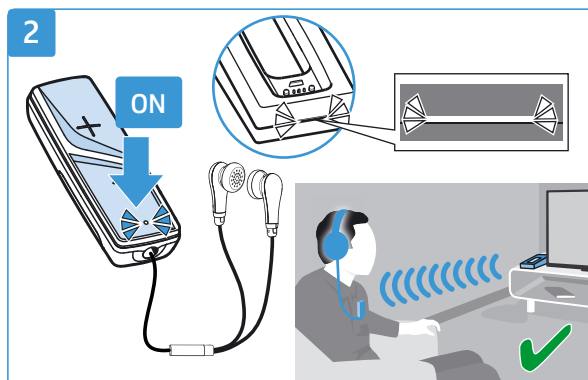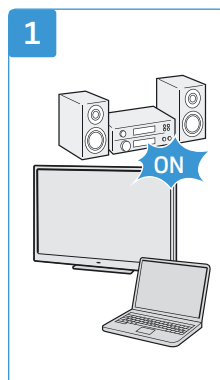

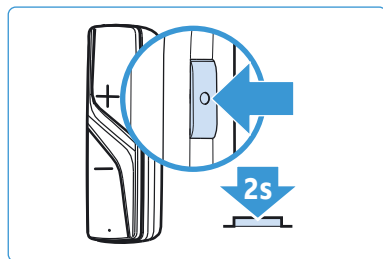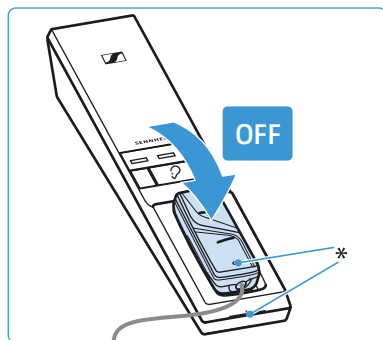

* Lampan slocknar

Stäng av det trådlösa hörlurssystemet

- ▶ Lägg mottagaren i laddningsfacket på sändaren. Mottagaren stängs av. Lampan *mottagarstatus* slocknar. Laddningen startar (se sidan 16).

Om du stänger av mottagaren men inte vill lägga den i laddningsfacket:

- ▶ Tryck på knappen *talförståelse* i 2 sekunder. Mottagaren stängs av. Lampan *mottagarstatus* är släckt. Sändaren stängs av automatiskt (standby) när ingen mottagare är ansluten. Lampan *sändarstatus* är släckt.

i Lägg alltid mottagaren i laddningsfacket på sändaren så att den är laddad nästa gång du vill använda den.

i Om mottagaren är utanför sändarens räckvidd längre än 5 minuter eller om sändaren inte tar emot några ljudsignaler på 30 minuter, stängs hörlurssystemet av automatiskt (standby).


För att skilja sändaren från elnätet, t.ex. när du åker på semester:

- ▶ Dra ut nätadaptern ur eluttaget.


Fäst sändaren på kläderna

Följ anvisningarna nedan för att fästa mottagare beroende på hörlurarna eller induktionsslingan:


- Lägg mottagaren bredvid dig så att du enkelt kan ta upp den och använda den.

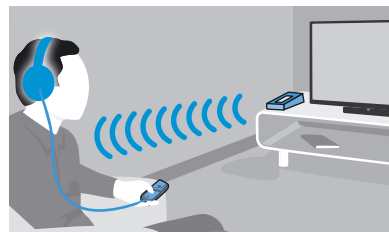


- Fäst mottagaren med klämman på kläderna så att hörlurskabeln inte är i vägen och så att mottagaren och sändaren har siktkontakt. Volymknapparna ska vara framåt så att du enkelt kan nå dem.

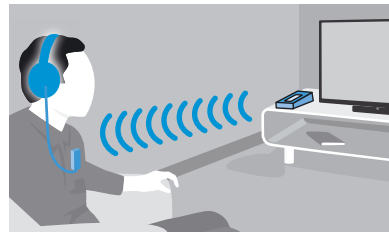

- Lägg induktionsslingan runt nacken så att mottagaren ligger mot bröstet. Volymknapparna ska vara framåt så att du enkelt kan nå dem.

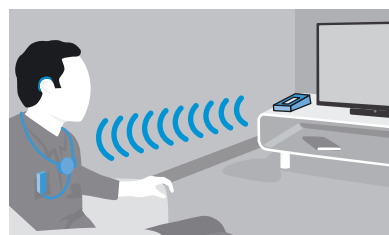

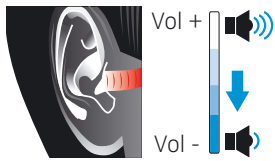


Ställ in volymen

VARNING

Fara på grund av hög volym!

- ▶ Ställ in en låg volym på mottagaren innan du tar på dig hörlurarna som är anslutna till mottagaren.
- ▶ Utsätt inte din hörsel för hög volym under lång tid.
- ▶ Tryck på volymknappen + eller – tills volymen är rätt. När lägsta eller högsta volym nåtts hörs en signal i mottagaren.

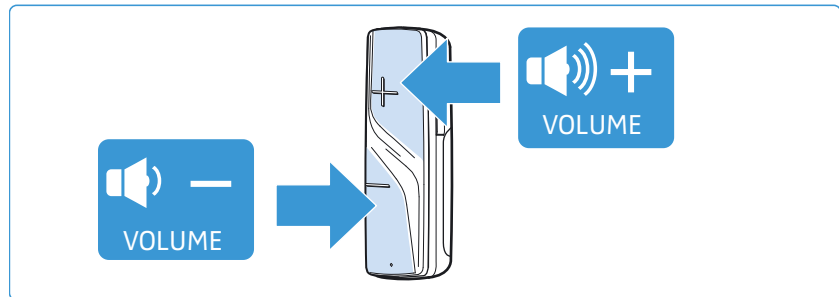

Om volymen är mycket hög och TV-hörlurssystemet stängs av och sedan slås på igen, sänks volymen för att skydda hörseln.

Ställ in balans

Balansen reglerar volymfördelningen mellan höger och vänster öra. Ställ in balansen så att du hör lika bra i båda öronen.

i Balansinställningen sparas i mottagaren. Om du använder flera mottagare med en sändare är varje hörlur perfekt anpassad till användaren, t.ex. du och din partner. Observera att bara en mottagare får vara ansluten till sändaren när individuella hörpreferenser ställs in.

- ▶ Tryck på knappen för balans **R** (höger) eller **L** (vänster) på sändaren för att höja eller sänka volymen i höger eller vänster öra. En signal hörs när inställningen har nått ändläget på höger eller vänster sida.



För att ställa in balansen i mitten igen:

- ▶ Tryck på knappen för balans **R** (höger) och **L** (vänster) samtidigt i 3 sekunder.



i För att balansen inte ska justeras av misstag kan du aktivera ett balansskydd som spärrar balansinställningen (se sidan 30).

Använd hörprofil för att förbättra klangen

Hörprofilerna ändrar ljudsignalens klang för att bland annat ge en bättre talförståelse. Profilerna förändrar vissa frekvensområden genom att låga eller höga toner förstärks eller sänks (se tabellen).

En kompressionsfunktion är aktiverad i alla profiler som jämnar ut volymskillnader, genom att tysta passager i volymen förstärks och höga passager sänks.


i Hörprofilen sparas i mottagaren. Om du använder flera mottagare med en sändare är varje mottagare perfekt anpassad till användaren, t.ex. du och din partner. Observera att bara en mottagare får vara ansluten till sändaren när individuella hörpreferenser ställs in.

Visa inställd hörprofil

Den inställda hörprofilen visas inte hela tiden.

För att kontrollera vilken hörprofil som är inställd:

- ▶ Sätt på mottagaren (se sidan 19).
- ▶ Tryck snabbt på hörprofilsknappen på sändaren. Aktuell hörprofil visas i 10 sekunder.

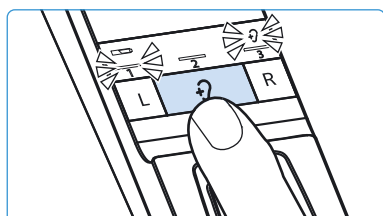


Aktiverad hörprofil	Lampa för hörprofil ↻	Klanganpassning	Kompression
–	 Ingen indikering lyser	Den anslutna ljudkälla återges oförändrat.	Nej
Hörprofil 1	 Indikering 1 lyser	Låga toner förstärks något för en varm, full klang. Höga toner sänks och klirrar mindre.	Ja
Hörprofil 2	 Indikering 2 lyser	Höga toner förstärks mycket för kristallklar klang, särskilt visslande tal och höga toner som fågelkvitter hörs tydligt.	Ja
Hörprofil 3	 Indikering 3 lyser	Låga toner sänks så att de inte täcker höga toner.	Ja

i En bild av hörprofilerna finns på sidan 37.


Välj hörprofil

Gör så här för att välja en hörprofil som passar dig:


- 1 Sätt på ljudkällan och sätt på ett program där man mest pratar.

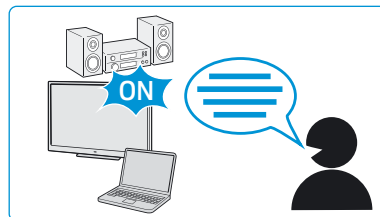


- 2 Sätt på hörlurarna till mottagaren och kontrollera att bara den här mottagaren är ansluten till sändaren. Annars kan inte hörprofilen ställas in.

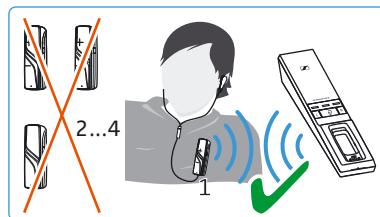

- 3 Ställ in balansen med knapparna L och R på sändaren (se sidan 22). Alla hörprofiler som sedan ställs in är då optimalt anpassade till höger och vänster öra.

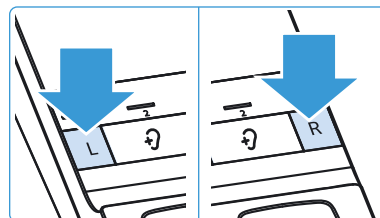

- 4 Tryck in hörprofilsknappen på sändaren i 2 sekunder för att välja nästa hörprofil. Tryck i 2 sekunder igen för att gå till nästa hörprofil.

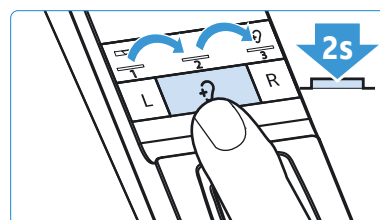

- 5 Testa vilken av hörprofilerna 1, 2 eller 3 som ger bäst klang och hörsel. Din individuella hörprofil är inställd och sparad i mottagaren



i Vi rekommenderar att du då och då väljer en annan hörprofil eftersom din hörsel kan förändras med tiden.

i När du ändrar hörprofil stängs talförståelsen av automatiskt så att hörprofilen hörs oförändrat (se sidan 25).

i För att hörprofilen inte ska justeras av misstag kan du aktivera ett skydd som spärrar hörprofilsinställningen (se sidan 30).

Sätt på och stäng av talförståelsen


Om tal störs av bakgrundsljud kan det vara svårt att höra vad som sägs.


Funktionen talförståelse identifierar och minskar störande bakgrundsljud automatiskt. Ljudsignalen analyseras och anpassas hela tiden så att talet betonas och förstås bättre.

Tillämpningsexempel

Tillämpning	Talförståelse	Fördel
Långfilmer, TV-serier eller ljudböcker	På	Dialoger hörs bättre även om det finns bakgrundsmusik och andra ljud.
Idrotts- eller fotbollssändningar	På	Kommentarerna hör bättre när de störs av bakgrundsljud på arenan.
Musik	Av	Inget tal, därför behövs inte funktionen.

- ▶ Tryck på knappen för *talförståelse* för att sätta på eller stänga av funktionen.

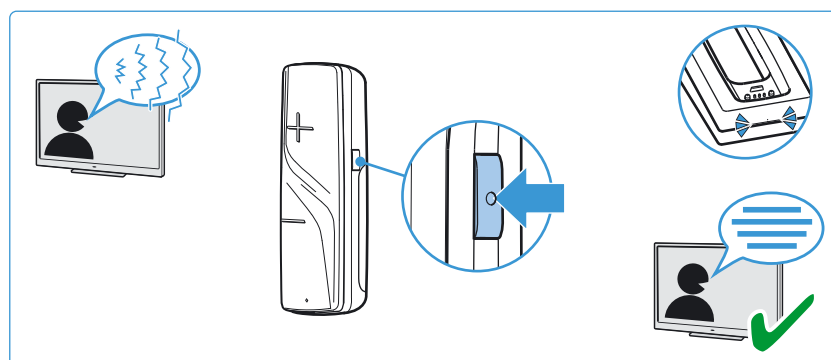

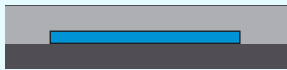Lampa för sändarstatus	Funktionen talförståelse
 Lyser blått	På; störande bakgrundsljud filtreras bort effektivt, tal hörs bättre.
 Lyser vitt	Av

i Talförståelse kan användas i kombination med hörprofil 1-3.

Rengöring och skötsel av Flex 5000



VARNING!



Vätskor kan förstöra produktens elektronik!

Om vätska tränger in i höljet kan det leda till kortslutning och förstöra elektroniken i produkten.

- ▶ Låt inga vätskor komma i närheten av produkten.
- ▶ Använd inte lösnings- eller rengöringsmedel.

För att rengöra det trådlösa hörlurssystemet:

- ▶ Stäng av det trådlösa hörlurssystemet och dra ut sändarens nät-kontakt innan du rengör.
- ▶ Rengör endast produkten med en torr och mjuk trasa.
- ▶ Rengör då och då laddningskontaktarna på mottagaren och laddningsfacket t.ex. med en bomullspinne.

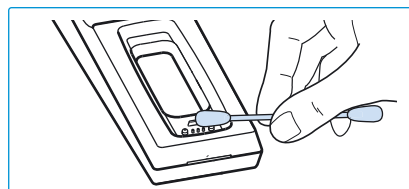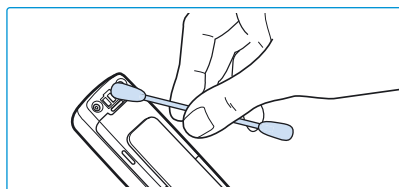

Byt batteriet i mottagaren

Batteriet BAP 800 i mottagaren sitter kompakt i höljet och måste inte bytas eller tas ut.

Om mottagarens drifttid minskar betydligt eller om fel indikeras när batteriet laddas (se sidan 16), kan batteriet vara slut eller defekt och måste i så fall bytas.

VARNING!

Risk för produktskador!

Under garantitiden får batterierna endast bytas eller tas ut av en Sennheiser-återförsäljare. Annars upphör garantin att gälla.

- ▶ Kontakta din Sennheiser-återförsäljare om du behöver byta eller ta ut batterierna.

När garantitiden har gått ut kan du låta vilken kvalificerad verkstad som helst byta eller ta ut batterierna på lämpligt vis. Anvisningar för kvalificerad service centers om hur man tar bort batterierna tillhandahålls av Sennheiser servicepartner.

Det behövs lämpliga verktyg för att byta batterierna. Därför rekommenderar vi att batteriet byts hos din Sennheiser-återförsäljare. Sennheiser-återförsäljare nära dig hittar du på www.sennheiser.com.


Använd extrafunktioner

Följande extrafunktioner behövs inte för normal användning av det trådlösa hörlurssystemet. Du kan dock utöka användningen och anpassa vissa funktioner individuellt.

Sammankoppla en eller flera mottagare med sändaren

Mottagaren och sändaren i det trådlösa hörlurssystemet är redan sammankopplade vid leveransen. Följande steg måste bara utföras om du vill koppla fler mottagare till sändaren.


Du kan använda upp till 4 mottagare samtidigt med sändaren för ljudöverföring. Alla andra sammankopplade och aktiverade mottagare kan inte ansluta till sändaren.

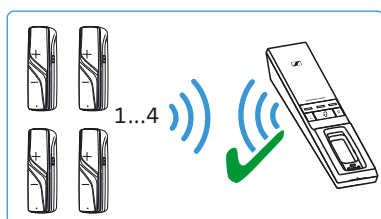

i Om fler än en mottagare har anslutits till sändaren kan inte tid kvar och/eller hörprofilen visas. Det går inte heller att ställa in balans och hörprofil. De här funktionerna kan bara användas eller ställas in när en mottagare är ansluten till sändaren.


Alternativ A (kontakt-sammankoppling)

- ▶ Lägg mottagaren i laddningsfacket på sändaren. Mottagaren kopplas samman med sändaren.

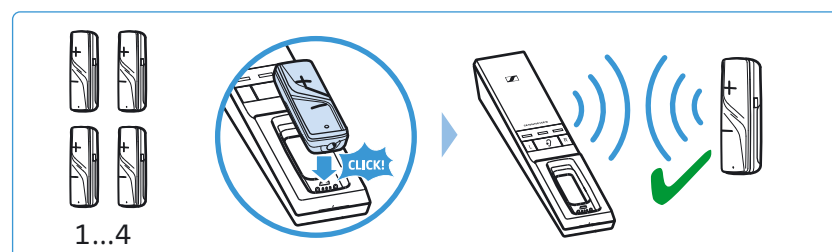

Alternativ B (närzon-sammankoppling)

- 1 Placera mottagaren så nära sändaren som möjligt.
- 2 Tryck samtidigt på volymknapparna +/- och håll intryckt tills lampan för *mottagarstatus* blinkar rött. När sammankopplingen är klar blinkar lampan för *mottagarstatus* grönt och lampan för *sändarstatus* vitt. Släpp knapparna.

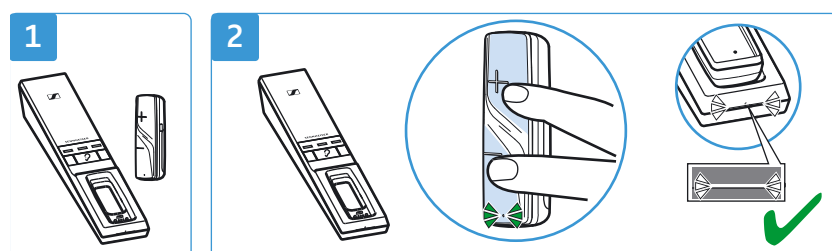


Avancerade inställningar

Med de avancerade inställningarna kan du anpassa det trådlösa hörlurssystemet individuellt och t.ex. skydda systemet mot ändringar som görs av misstag.

Aktivera skyddad inställningsfunktion

Avancerade inställningar kan ändras med en skyddad inställningsfunktion:

- 1 Skilj sändaren från elnätet genom att dra ut kontakten på nätadaptern.
- 2 Tryck in knappen för hörprofil och anslut sändaren till elnätet genom att sätta in kontakten på nätadaptern i det gula uttaget på sändaren.

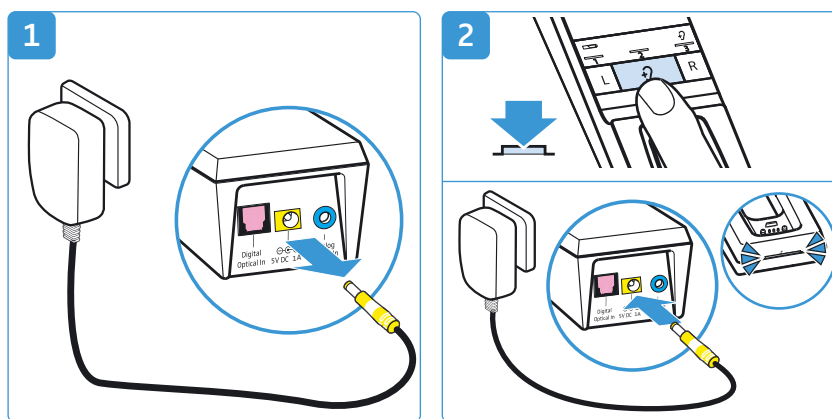


Den skyddade inställningsfunktionen är aktiverad. Lampan för *sändarstatus* blinkar blått. Lampindikeringarna visar aktuella inställningar, se kapitlen nedan:

- Indikering av batteristatus (se sidan 29)
- Laddningspåminnelse (se sidan 29)
- Hörprofils- och balansskydd (se sidan 30)

Stäng av den skyddade inställningsfunktionen och spara avancerade inställningar

För att spara avancerade inställningar och stänga av den skyddade inställningsfunktionen:

- 3 Skilj sändaren från elnätet genom att dra ut kontakten på nätadaptern.

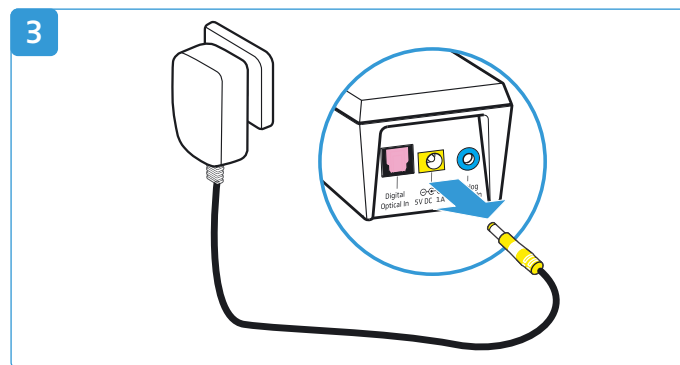

Indikering av batteristatus

Inställningen sparas i **sändaren** oberoende av vilken mottagare som används.

För att ändra indikeringen:

- ▶ Kontrollera att den skyddade inställningsfunktionen på sändaren är aktiverad (se sidan 28).
- ▶ Tryck på balansknappen **L**.



Status och indikering av <i>batterilampan</i>	Funktion/reaktion
Permanent på (användning och laddning)*  Indikering 1 lyser	Batterinivån visas hela tiden under laddningen. Batterinivån visas hela tiden under användningen.
På i 30 sekunder (användning och laddning)  Indikering 1 är släckt	Batterinivån visas i 30 sekunder under laddningen. Sedan slocknar alla lampor. Laddningen fortsätter. Batterinivån visas i 30 sekunder under användningen. Sedan slocknar indikeringen.

*Fabriksinställning

- ▶ Spara inställningen genom att skilja sändaren från elnätet (se sidan 28).

Laddningspåminnelse

Inställningen sparas i **sändaren** oberoende av vilken mottagare som används.

För att sätta på eller stänga av funktionen:

- ▶ Kontrollera att den skyddade inställningsfunktionen på sändaren är aktiverad (se sidan 28).
- ▶ Tryck på balansknappen **R** på sändaren.



Status och indikering av laddningspåminnelsen	Funktion/reaktion
På*  Indikering 3 lyser	Om mottagaren har stängts av och sändaren är i standby-läget blinkar batterilampan i 10 minuter för att påminna om att mottagaren ska laddas.
Av  Indikering 3 är släckt	När det trådlösa hörlurssystemet stängts av är alla lampor släckta.


*fabriksinställning

- ▶ Spara inställningen genom att skilja sändaren från elnätet (se sidan 28).

Hörprofils- och balansskydd

Inställningen sparas i **mottagaren** oberoende av vilken sändare som används.

- ▶ Kontrollera att balans och hörprofil är korrekt inställda på mottagaren (se sidan 22 och 23).
- ▶ Kontrollera att den skyddade inställningsfunktionen på sändaren är aktiverad (se sidan 28).
- ▶ Lägg mottagaren i laddningsfacket på sändaren.
- ▶ Tryck på volymknappen **+** på mottagaren för att ställa in hörprofils- och balansskyddet.

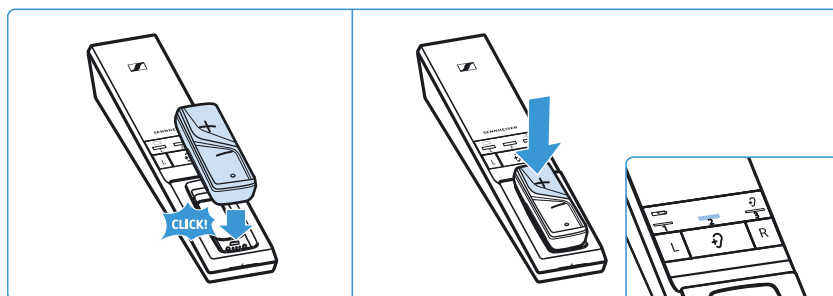

Status och indikering av skyddsfunktionen	Funktion/reaktion
På  Indikering 2 lyser	Inställd hörprofil och balans kan inte ändras/stängas av.
Av*  Indikering 2 är släckt	Hörprofilen kan ändras genom att du trycker på hörprofilsknappen i 2 sekunder. Balansen kan ändras.

*fabriksinställning


- ▶ Spara inställningen genom att skilja sändaren från elnätet (se sidan 28).

i Om flera mottagare används och hörprofilerna ska skyddas, kan du lägga en mottagare i taget i laddningsfacket och ställa in hörprofils- och balansskyddet.

Återställ fabriksinställningar



För att återställa sändarens fabriksinställningar:

- 1 Skilj sändaren från elnätet genom att dra ut kontakten på nätadaptern.
- 2 Tryck på knapparna **L**, **+** och **R** samtidigt.
- 3 Anslut sändaren till elnätet genom att ansluta nätadapterns kontakt till det gula uttaget på sändaren, och tryck in de 3 knapparna i minst 3 sekunder.
Alla lampor på sändaren blinkar. Alla inställningar i sändaren återställs till fabriksinställningarna.

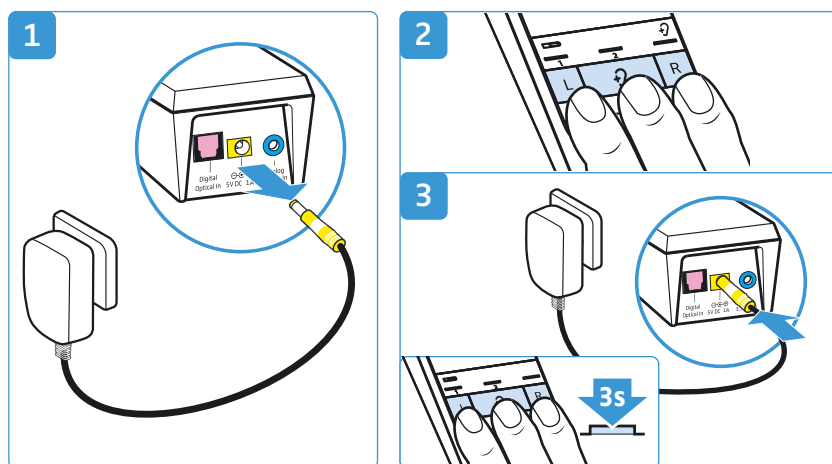

För att återställa mottagarens fabriksinställningar:

- Lägg mottagaren i laddningsfacket på sändaren. Lampan *mottagarstatus* blinkar grönt. Alla inställningar i mottagaren återställs till fabriksinställningarna.

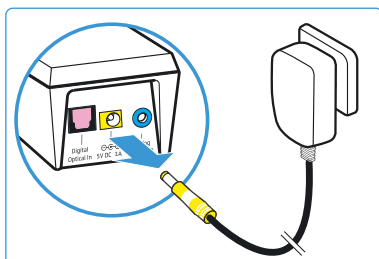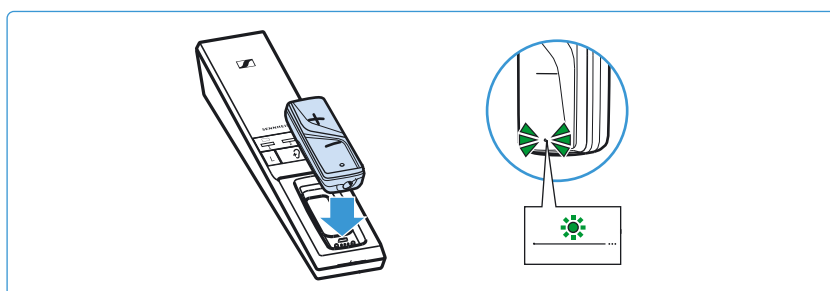

- i** Mottagaren kan även ligga i laddningsfacket från början för att återställa fabriksinställningarna i sändaren och mottagaren samtidigt.
- Skilj sändaren från elnätet genom att dra ut kontakten på nätadaptern. Fabriksinställningarna har återställts och det trådlösa hörlurs-systemet kan användas.

Ladda batteriet med laddaren MCA 800

Om du har en laddare MCA 800 (tillbehör) kan du även ladda hörlurarna med den.




VARNING

Störningar pga. magnetfält!

Laddaren MCA 800 genererar starka permanenta magnetfält. Dessa kan störa pacemaker och implanterade defibrillatorer (ICD).

- ▶ Håll ett avstånd på minst 10 cm mellan laddarens magnethållare och pacemaker eller implanterade defibrillatorer.

- 1 Välj en passande adapter och sätt på den på nätadaptern så att det hörs att den hakar fast.
- 2 Anslut kontakten på nätadaptern till uttaget på laddaren MCA 800.
- 3 Sätt in nätadaptern i eluttaget.
- 4 Anslut laddaren till laddningskontakterna på hörlurarna. Laddaren hamnar i rätt läge med hjälp av magneterna. Batteriet laddas. Lampan lyser rött på laddaren. När batteriet är helt laddat lyser lampan grönt.

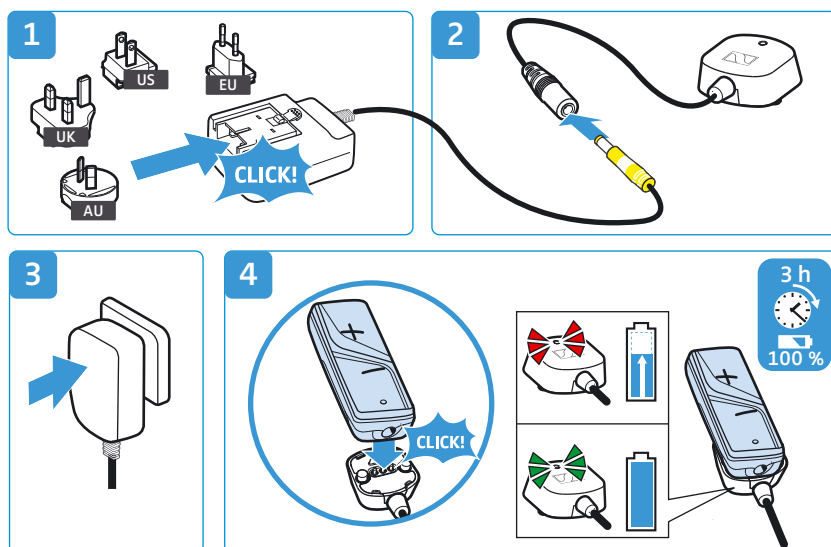

Du kan använda mottagaren medan den laddas. Observera att mottagaren kan bli varm under laddningen. Uppnådd batterinivå visas på sändaren (se sidan 16).

Om lampan på laddaren blinkar rött/grönt finns det ett laddnings- eller batterifel. Ta i så fall bort laddaren från mottagaren. Mer information om batterier finns på sidan 26.

Åtgärder vid fel

Problem	Möjlig orsak	Möjlig åtgärd	Sidan
Sändaren aktiveras inte	Ingen elanslutning	Kontrollera anslutningarna på nätadaptern.	15
Det går inte att sätta på mottagaren	Batteriet är tomt	Ladda batteriet.	16
	Batteriet är helt tomt.	Ladda batteriet i flera timmar. Om batteriet är helt urladdad börjar inte laddningen förrän efter en stund (upp till en timme).	
Inget ljud	Ingen elanslutning	Kontrollera anslutningarna på nätadaptern.	15
	Ljudkontakten är inte korrekt ansluten.	Kontrollera kontakten.	11
	Ljudkällan är avstängd.	Slå på ljudkällan.	–
	Den analoga ljudkällans volym är på min. eller avstängd (mute).	Höj volymen på den analoga ljudkällan till en lagom nivå eller avaktivera mute-funktionen på ljudkällan.	–
	Ljudkabeln är defekt	Byt ljudkabeln.	–
	Hörlurarna eller induktionsslingan är inte korrekt anslutna till mottagaren	Kontrollera kontakten.	18
	Hörlurarna är inställda på mute eller volymen har ändrats.	Kontrollera inställningarna på dina hörlurar.	–
	Mottagaren är inte korrekt sammankopplad med sändaren (t.ex. ytterligare hörlurar/mottagare)	Koppla mottagaren till sändaren igen.	27
Inget ljud från den digitala ljudkällan	Kablar är anslutna både till den digitala och analoga ljudingången	Ta bort kabeln från den analoga ljudingången.	11
	Den digitala ljudkällan sänder signaler i ett ljudformat som inte stöds. Lampan för <i>sändarstatus</i> blinkar vitt/blått.	Ställ in ljudkällans ljudformat på "PCM" med en frekvens på max. 96 kHz (se bruksanvisningen till ljudkällan).	–
Ljudet försvinner tillfälligt, ev. hörs 5 signaler i hörlurarna	Mottagaren är utanför sändarens räckvidd.	Minska avståndet mellan mottagaren och sändaren.	–
	Signalen är avskärmad.	Ta bort hinder mellan sändaren och mottagaren.	–
		Följ anvisningarna om hur mottagaren fästs.	20
	Det finns störande enheter (t.ex. WLAN-router, Bluetooth-enheter eller mikrovågsugnar) i närheten	Flytta sändaren eller ändra hörlurarnas läge. Placera sändaren minst 50 cm från andra trådlösa enheter.	10


Problem	Möjlig orsak	Möjlig åtgärd	Sidan
Ljudet är för tyst.	Volymen på mottagaren är för låg.	Höj volymen på mottagaren.	21
	Volymen på den analoga ljudkällan är för låg.	Höj volymen på den analoga ljudkällan till en lagom nivå (ca 1 V _{eff}).	–
	Hörlurarna är inställda på mute eller volymen har ändrats.	Kontrollera inställningarna på dina hörlurar.	–
	Hörlurarna har för hög impedans eller för låg nominell ljudtrycksnivå	Använd hörlurar med lägre impedans eller högre nominell ljudtrycksnivå.	–
Ljudet hörs bara på en sida.	Balansen har justerats	Ställ in balansen.	22
	Ljudkabeln är inte korrekt ansluten.	Kontrollera kontakten.	11
	TV:n har bara en monoutgång för hörlurarna.	Använd en adapter för mono- till stereouttag för att ansluta sändaren.	–
Ljudet har störningar.	Ljudkabeln är defekt.	Byt ljudkabeln.	–
	Ljudkällans signal är störd	Sänk volymen på ljudkällan.	–
	Volymen på mottagaren är för hög.	Sänk volymen på mottagaren.	21
Ljudet ekar när TV:n är på.	Du använder öppna hörlurar.	Använd slutna hörlurar eller öron-/öronkanalshörlurar.	–
	På vissa TV-apparater kan man ställa in den digitala ljudutgångens signal. Den kan vara fördröjd eller ha latens.	Kontrollera ljudutgångens inställningar på TV:n och ställ in latensen på 0.	–
Batteristatus- och laddningsindikeringen släcks.	Batteristatusindikeringen är inställd så att den släcks efter 30 sekunder.	Ställ in batteristatusindikeringen så att den visas hela tiden.	29
	Fler än 1 mottagare är anslutna till sändaren.	Den här funktionen kan bara användas när hakbygel hörlurar/ mottagare är anslutna till sändaren.	–
2 signaler hörs under användning	Batteriet är nästan slut.	Ladda batteriet.	16
Användningstiden blir kortare.	Batteriet är förbrukat.	Låt en behörig Sennheiser-servicepartner byta batteriet.	26
Hörprofilen eller balansen kan inte aktiveras eller ändras.	Hörprofils- och balansskyddet är på.	Avaktivera hörprofils- och balansskyddet.	30
	Fler än 1 mottagare är anslutna till sändaren.	Den här funktionen kan bara användas när hakbygel hörlurar/ mottagare är anslutna till sändaren.	–

Problem	Möjlig orsak	Möjlig åtgärd	Sidan
Mottagare ansluts inte till sändaren.	Mottagaren är inte kopplad till sändaren.	Koppla samman mottagaren och sändaren.	27
	Avståndet till sändaren är för stort.	Minska avståndet mellan mottagaren och sändaren.	–
	Fler än 4 mottagare är anslutna till sändaren	Max. 4 hörlurar/mottagare kan användas samtidigt med sändaren för att återge ljud.	–

Om det uppstår problem med produkten som inte finns med i tabellen eller om problemet inte kan åtgärdas med hjälp av förslagen, kan du hitta mer information om Flex 5000 på www.sennheiser.com. Där finns det en lista med vanliga frågor och svar (FAQ).

Du kan även kontakta en Sennheiser-återförsäljare om du behöver hjälp. Sennheiser-återförsäljare nära dig hittar du på www.sennheiser.com.

Om du lämnar sändarens räckvidd

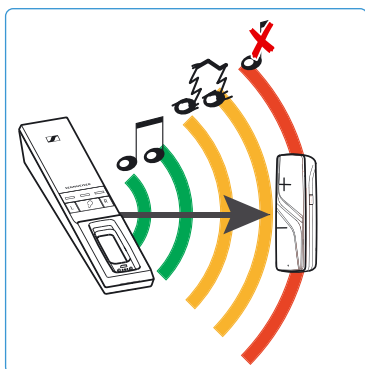

Sändarens räckvidd beror på omgivningsförhållandena som vägg-tjocklek och väggkonstruktion. Om mottagaren lämnar sändarens räckvidd försvinner ljudet tillfälligt innan anslutningen bryts helt. Det hörs varningssignaler i mottagaren och lampan för *mottagar-status* blinkar grönt (eller rött om batteriet nästan är slut).

Om du kommer tillbaka till sändarens räckvidd inom 5 minuter ansluts mottagaren automatiskt igen.

Om du är utanför sändarens räckvidd längre än 5 minuter stängs mottagaren av automatiskt.

Tekniska data

System Flex 5000

Bärvågsfrekvens	2,4 till 2,4835 GHz
Modulationstyp	8-FSK digital
Brusspänningsavstånd	Analog ingång: Norm. 85 dBA vid 1 V _{eff} Digital ingång: > 90 dBA
HF-uteffekt	max. 10 dBm
Ljudlatens	< 60 ms
Räckvidd	upp till 30 m (fritt siktkontakt)
Antal mottagare som kan vara anslutna till sändaren samtidigt.	4
Temperaturområde	Användning: 5 °C till +40 °C Förvaring: -25 °C till +70 °C
Relativ luftfuktighet (ingen kondens)	Användning: 10 till 80 % Förvaring: 10 till 90 %

Mottagare RR Flex

Anslutning	3,5 mm-stereouttag för hörlurar (minst 16 Ω) eller induktionsslingor för hörapparater
Uttagets utspänning	norm. 900 mV vid 32 Ω
Funktionstid	upp till 12 timmar
Batteriladdningstid	upp till 3 timmar
Spänningsförsörjning	Inbyggt litiumpolymerbatteri BAP 800, 3,7 V, 350 mAh
Vikt	ca 33 g
Mått (B x H x D)	ca 29 mm x 87 mm x 25 mm


Sändare TR 5000

Anslutningar	Digital ingång: optisk Dataström: PCM, 32 - 96 kHz/16 - 24 bitar
Spänningsförsörjning	Analog ingång: 3,5 mm stereouttag Inspänningsområde: 0,15 till 4,0 V _{pk}
Effektförbrukning	5 V $\overline{=}$, 1 A
Mått (B x H x D)	Användning: norm. 1 W Standby: ≤ 0,5 W (utan laddning)
	ca 50 mm x 42 mm x 270 mm

Nätadapter NT 5-10AW

Nominell inspänning/	100 – 240 V~/
	300 mA
Nätfrekvens	50 – 60 Hz
Nominell utspänning	5 V ===
Nominell utström	1 A
Temperaturområde	Användning: 0 °C till +40 °C Förvaring: -25 °C till +70 °C
Relativ luftfuktighet (ingen kondens)	Användning: 10 till 80 % Förvaring: 10 till 90 %

Hörprofil 1-3

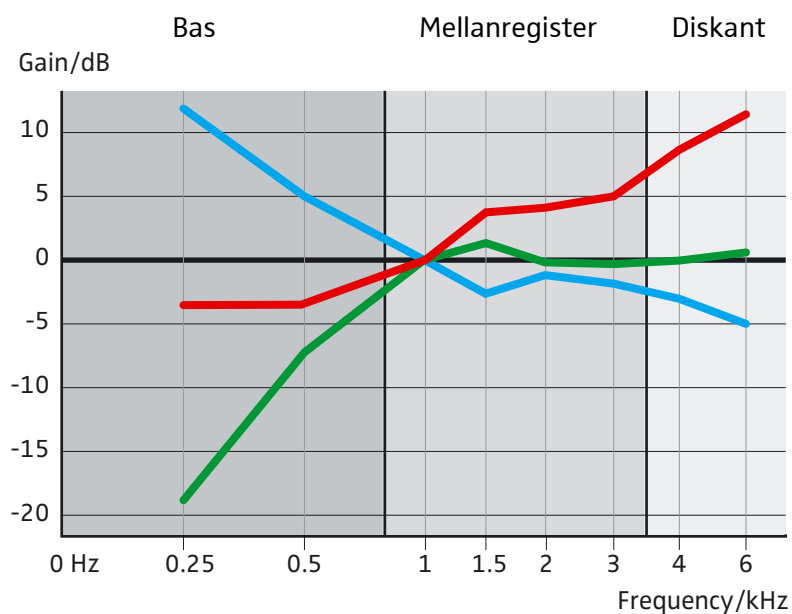

- Profil 1
- Profil 2
- Profil 3

Tillverkarintyg

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG lämnar 24 månaders garanti på denna produkt.

Aktuella garantivillkor finns på internet på www.sennheiser.com eller hos din Sennheiser-återförsäljare.

Produkten överensstämmer med följande krav

EU-försäkran om överensstämmelse



- ErP-direktivet (2009/125/EG)
- RoHS-direktivet (2011/65/EU)

Härmed försäkrar Sennheiser electronic GmbH & Co. KG att det trådlösa systemet av typen TR 5000, RR Flex uppfyller direktivet 2014/53/EU.

Hela EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande adress: www.sennheiser.com/download.

Avfallshantering



- WEEE-direktivet (2012/19/EU)
- Batteridirektiv (2006/66/EG och 2013/56/EU)

Symbolen med den överstrukna soptunnan på produkten, batterier/uppladdningsbara batterier och/eller förpackningen anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land.

Mer information om hur dessa produkter ska återvinnas kan du få från din kommun, miljöstation eller återvinningscentral eller av din Sennheiser-återförsäljare.

Ett separat insamlande av gamla elektriska och elektronisk apparater, batterier/uppladdningsbara batterier och förpackningar har som syfte att främja återvinningen och/eller att förebygga negativa effekter exempelvis orsakade av skadliga ämnen. På detta sätt bidrar du till att skydda miljön och vår hälsa.

Varumärken

Sennheiser är ett registrerat varumärke som tillhör Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

Andra produkt- och företagsnamn som nämns i den här bruksanvisningen tillhör sina respektive ägare.



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Publ. 08/17, 570736/A02